

hauwo

PATIENTENSICHERHEIT 4.0

hm 950 NanoPak®

NEU!

HDMI Buchse
für externen
Monitor

V3.1

hmo 950 NanoPak®

VALIDIERBARES DURCHLAUFSIEGELGERÄT MIT TOUCHSCREEN
FÜR DIE PROZESSSICHERE VERPACKUNG VON SIEGELBAREN
BEUTELN UND SCHLÄUCHEN.

hm 950 DC-V/DC-VI NanoPak®

Das NanoPak® Siegelgerät übertrifft alles, was es bisher in Punkto Siegelgeräte gegeben hat, also smarte Bedienung, volle Digitalisierung, Vernetzbarkeit und Nachhaltigkeit ganz im Sinne des Industrie 4.0 Gedanken. Das Design des NanoPak® lehnt sich an das preisgekrönte Design der hawo Generation-Easy-Reihe an. Die Geräte dieser Produktgeneration haben wir für die hohen Ansprüche an Professionalität, Ästhetik und Solidität - unter Berücksichtigung höchster Sicherheitsrichtlinien - in Praxen und AEMP's in Krankenhäusern entwickelt.

NEU!

SOFTWARE 4.0
benutzerfreundlich
und intuitiv



▶ Auf Youtube finden Sie
detaillierte Tutorials zu den
einzelnen Gerätefunktionen
(z.B. Benutzereingaben).



Das NanoPak® ist in Edelstahl, sowie in den Farben Diamantschwarz, Weiß und Original Orange erhältlich. Die Farbe Original Orange greift die Farbe der ersten hawo Siegelgeräte auf, die nach der Gründung ausgeliefert wurden. Auf Anfrage kann das NanoPak in Sonderfarben oder individuell foliert geliefert werden.



GreenTek® – NACHHALTIGKEIT.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind kein Selbstzweck. Das NanoPak® setzt konsequent auf ressourcenschonendes Design mit einer völlig neuartigen Siegeltechnologie, die mit einem Bruchteil der Energie vergleichbarer Geräte auskommt. Die Heizung erreicht in Rekordzeit die Betriebstemperatur und arbeitet mit einem hocheffizienten 24 Volt System, das die Leistungsabnahme auf ein Minimum reduziert. Die Stand-by-Funktion bzw. Abschaltautomatik bei Nichtgebrauch rundet das GreenTek-Konzept von hawo ab. Ganz ohne Kompromisse bei der Qualität der Siegelergebnisse.



ProTrack® – ÜBERWACHUNG.

Alle NanoPaks sind nach ISO 11607-2 validierbar.

NEU: ProTrack ist eine optionale Technologie für die ganzheitliche Überwachung des Siegelprozesses über die gesamte Siegelnahtlänge. Eine Technologie für höchste Ansprüche. Für jede Siegelnaht werden Temperatur, Anpressdruck und Geschwindigkeit überwacht und auf einem USB-Stick aufgezeichnet. Die innovative Technologie kann bis zu 1.000 Messwerte innerhalb einer Naht erfassen (zusätzlicher USB-Stick erforderlich).



IntelligentScan® – PROGRAMMIERUNG.

Das NanoPak® lässt sich wie gewohnt mit einem Scanner bedienen. Die Eingabe von Daten wird damit noch komfortabler und sicherer. Bei der hawo IntelligentScan®-Technologie werden über die PC-Software zuvor alle notwendigen Gerätekonfigurationen für die verschiedensten Verpackungsmaterialien, Druck- und Personaldaten sowie komplette Druckreihenfolgen eingegeben.

SealPeak® – SIEGELNAHTFESTIGKEIT.

Bei der Siegelnaht kommt die bewährte hawo SealPeak® Technologie zum Einsatz. hawo SealPeak®-Siegelnähte sind 12 mm breite Flachnähte, die im Zentrum eine sogenannte Barriere mit enorm hoher Festigkeit aufweisen, den SealPeak®. Die Siegelnahtfestigkeit nimmt von den Außenbereichen bis hin zum SealPeak® stetig zu. Diese weichen Kanten haben den Vorteil, dass Instrumente an den Kanten nicht ausbrechen, sondern sanft in die Naht eindringen und von dem SealPeak® im Zentrum aufgefangen werden. SealPeak® Siegelnähte haben darüber hinaus hervorragende Peeleigenschaften ohne Papierabfaserungen, selbst wenn die Peelrichtung anwenderseits nicht eingehalten wird. Selbstverständlich ist das NanoPak® für das Versiegeln aller bekannten siegelbaren, vorgefertigten Sterilbarrieresysteme und medizinischen Verpackungen sowie von unbeschichtetem Tyvek®² und polyolefinen Verpackungen geeignet.



InkTest PRO | PRO HDPE | PRO PLUS

In Verbindung mit den innovativen Testsystemen InkTest PRO, InkTest PRO HDPE (rot, für Tyvek®²/Plastik-Materialien) und dem neuen InkTest PRO PLUS (schwarz, für andere polyolefine Materialien) werden die geforderten Routinekontrollen der RKI Empfehlung einfach und kostengünstig erfüllt. InkTest PRO ist ideal für die Überprüfung von Seitenfaltenfolien geeignet.

Seal Check MED | HPDE | PP

Die Siegelindikator Seal Check macht fehlerhafte Stellen der Siegelnaht auf dem dunklen Indikatorstreifen sichtbar. hawo Seal Check ist nicht geeignet bei Verwendung von Seitenfaltenfolie. Der Seal Check ist erhältlich für Klarsichtfolien aus Papier/Plastik (Seal Check med), für Tyvek®²/Plastik (Seal Check HDPE) und für polyolefine Materialien (Seal Check PP).



² Tyvek® ist e. W. der E.I. du Pont Nemours.

hm 950 DC-V/ DC-VI

SIEGELMATERIALIEN

Siegelbare Papierbeutel nach EN ISO 11607-1/EN 868-4	x (geeignet für Seitenfaltenfolien)
Siegelbare Beutel und Schläuche nach EN ISO 11607-1/EN 868-5 aus Folie und Papier nach EN 868-3	x (geeignet für Seitenfaltenfolien)
Siegelbare Beutel und Schläuche nach ISO EN 11607-1/EN 868-5 aus Folie und unbeschichteten Materialien aus Polyolefinen nach EN 868-9 (z. B. Tyvek® ¹)	x
Siegelbare Beutel und Schläuche nach ISO 11606-1/EN 868-5 aus PP-Vlies oder PP-Nonwoven	x ¹²
Peelfähige Folien PA/PE	x ²

TECHNISCHE DATEN

Art des Gerätes	Durchlaufsiegelgerät
Validierbarer Prozess	x
Mikroprozessorsystem	x
Anzeige	4,3" TFT Grafik Farbe
Eingabetastatur	Touchscreen (externe Tastatur/Maus optional)
Druckwerk ³	hm 950 DC-V: 9-Nadel, einzeilig hm 950 DC-VI: 24-Nadel, einzeilig, für Sonderzeichen
RS 232-Anschluss	x
USB-Anschluss	x (4x)
Ethernet-Anschluss	x
Anschluss für Etikettendrucker	x
NEU: HDMI Anschluss	x
Durchlaufgeschwindigkeit	5-13 m/min (überwacht)
Siegeltemperatur	max. 220 °C (überwacht)
Anpresskraft (Siegeldruck)	80-120 N (überwacht)
Abschalttoleranz +/- 5°C (DIN 58953-7)	x
Siegelabstand vom Rand	0-35 mm
Siegelnahtbreite ⁴	12 mm
Siegelsystem	SealPeak (hawoflex)
Netzanschluss	100-240 V, 50/60 Hz
Leistung	90 Watt ⁵
Maße B x T x H	565 x 260 x 145 mm
Gewicht	16 kg
Farbauswahl	Edelstahl (Standard), Diamantschwarz, Weiß, Original Orange, Sonderfarbe auf Anfrage

ZUBEHÖR

hawo Prozessdokumentationssoftware ProDoc	x
hawo IntelligentScan	x
Ablageformtisch hm 950 T	x
PC Tastatur	x

¹ Tyvek® ist e. W. der E.I. du Pont Nemours.

² Freigabe und/oder Test notwendig.

³ Aluminium-Laminatfolie und peelfähige Folie PA/PE kann nicht bedruckt werden.

⁴ Andere Breiten optional.

⁵ Weicht im Aufheizprozess ab.

Technische Änderungen vorbehalten

10/2019 | 9.344.066

hawo GmbH
Obere Au 2-4
74847 Obrigheim
Germany
T +49 (0) 6261/9770-0
F +49 (0) 6261/9770-69
info@hawo.com
www.hawo.com

hawo USA:
hawo
321 North Clark Street
Suite 1425
Chicago IL 60654
T +1 312 585 8329
F +1 312 644 0738
info@hawo-usa.com
www.hawo-usa.com

hawo ASIA:
hawo
25 International Business Park
#03-105 German Centre
Singapore 609916
T +65 6433 5339
F +65 6433 5359
info@hawo-asia.com
www.hawo-asia.com

Folge uns:

